



Probeneinsendung ins Zentrallabor

KORREKT

Gilt für alle Röhrchen:

- Etikett direkt unterhalb des Verschlusses vertikal ankleben
- Etikett ist
 - nicht verschmiert
 - nicht beschrieben
 - nicht geknickt
 - komplett festgeklebt
- nur ein Barcode-Etikett per Röhrchen



Speziell für Urinproben:

- Kappe ist fest aufgesteckt
- Stempel ist bis zum Anschlag herausgezogen und abgeknickt

SO BITTE NICHT!



Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung (Tel. 85668)
Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. A. Peter

(Version B Stand 08.01.2025)

Universitätsklinikum Tübingen

Anstalt des öffentlichen Rechts, Sitz Tübingen

Steuer-Nr. 86156/09402

USt.-ID: DE 146 889 674

Geissweg 3

72076 Tübingen

Tel. +49 7071 29-0

www.medizin.uni-tuebingen.de

Aufsichtsrat

Dr. Hans J. Reiter (Vorsitzender)

Vorstand

Prof. Dr. Jens Maschmann (Vorsitzender)

Dr. Daniela Harsch (Stellv. Vorsitzende)

Prof. Dr. Ulrike Ernemann

Prof. Dr. Bernd Pichler

Klaus Tischler

Banken

Baden-Württembergische Bank Stuttgart:

IBAN: DE 41 6005 0101 7477 5037 93

BIC (SWIFT-Code): SOLADEST600

Kreissparkasse Tübingen:

IBAN: DE 79 6415 0020 0000 0141 44

BIC (SWIFT-Code): SOLADES1TUB