



Newsletter März 2019

Aktuelles zur Diagnostik der Tuberkulose

Interferon- γ -Release Assay (IGRA)

QuantiFERON®-TB Gold Plus (QFT®-Plus)

Haben Sie sich schon über den Befundtext „Quantiferon-Test: nicht durchgeführt“ gewundert?

Wir haben beobachtet, dass die bei uns eingehenden QFT®-Plus Kits zum Jahresbeginn 2019 gehäuft eine falsche Füllhöhe aufwiesen. 2018 waren 3,6% der Proben falsch befüllt, Januar und Februar 2019 allerdings 6,5%. Bei falscher Füllhöhe von einem der vier Blutentnahmeröhrchen darf der Test nicht durchgeführt werden.

Seit Ende 2018 liegt dem QFT®-Plus Kit kein Entnahmeset mehr bei. Zur Abnahme über einen „Butterfly“ können Sie den „Adapter für Blutkulturen“ (Zentrallager-Art.-Nr. 61339680) verwenden (s. Bild unten). Um an ein Luer-System anzuschließen kann zusätzlich der Multiadapter (Zentrallager-Art.-Nr. 3003058) verwendet werden.



Bei Anschluss an das Entnahmesystem, füllt sich das Vakuümörhrchen mit 1 ml Blut. Zur Überprüfung der korrekten Füllhöhe ist auf jedem Rörhrchen eine schwarze Markierung (s. Bild unten) als zulässiger Bereich (0,8 bis 1,2 ml) gedruckt. **Wenn die Füllhöhe nicht innerhalb der Markierung liegt, muss die Blutentnahme wiederholt werden!**

Wichtig ist hierbei das Entnahmesystem vorher zu Entlüften! Z. B. mit einer Monovette®.

Weitere Informationen zur Abnahme entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage des QFT®-Plus Kits.



Zentrale Rufnummer
der Mikrobiologie:
Tel. 29-81500